


Gebrauchsanweisung
Version Mai 2011

ZECKENKARTE

SafeCard

Die Zeckenkarte dient der Entfernung von
Zecken aus der Einstichstelle.

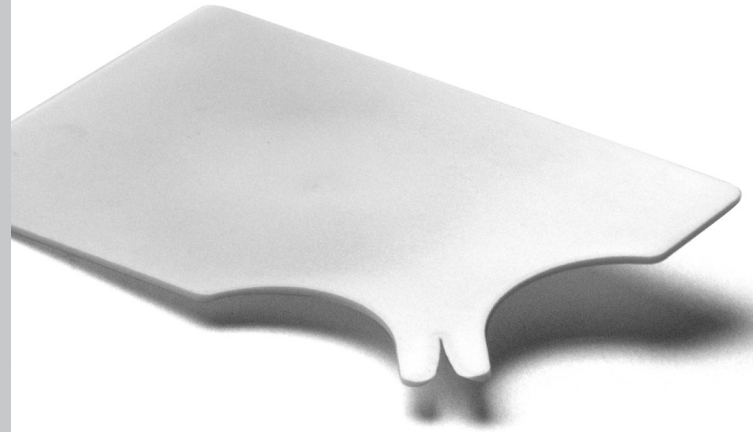

INHALT

01	Einleitung	2
02	Anwendungsbedingungen	2
03	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
04	Anwendung	3
05	Reinigung	3
06	Entsorgung und Nachbestellung	3
07	Hersteller, Lieferant und Serviceadresse	4

01 EINLEITUNG

Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (kurz: FSME) werden durch Zecken übertragen. Die sofortige Entfernung von Zecken kann das Risiko einer eventuellen Erregerübertragung und einer darauf folgenden Zeckenerkrankung reduzieren.

Mit der Zeckenkarte können Zecken ohne Kraftanwendung aus der Einstichstelle der Haut entfernt werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Anwendung/Gebrauch sorgfältig durch, bewahren Sie sie zusammen mit dem Produkt auf und geben Sie sie an andere Benutzer des Produkts weiter.

02 ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Zeckenkarte ist nur für eine private Anwendung bestimmt.

03 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Das in dieser Gebrauchsanweisung verwendete Signalworte und Gefahrenpiktogramm hat folgende Bedeutung:

➔ **HINWEIS**

Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

➔ **HINWEIS**

Achten Sie nach einem Zeckenstich in den nächsten Wochen auf eine allfällige Rötung an der Einstichstelle bzw. auf grippeartige Erscheinungen, Kopfschmerzen und sonstige körperliche Symptome und suchen Sie bei Auffälligkeiten einen Arzt auf.

Informationen zu Zecken, Zeckenschutz und den Krankheiten FSME und Lyme-Borreliose sowie Karten der FSME-Risikogebiete finden Sie im Internet z. B. unter www.zecken.de, www.zecken.ch, www.zecken.at. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihren Arzt.

04 ANWENDUNG

1. Gabeln Sie mit dem «Schnabel» der Zeckenkarte die Zecke auf (Abb. 1) und schieben Sie sie mit einer ruhigen und gleitenden Bewegung heraus (Abb. 2).



Abb. 1

2. Desinfizieren Sie die Einstichstelle, um Entzündungen zu vermeiden.



Abb. 2

3. Notieren Sie sich das Datum des Zeckenstichs.

05 REINIGUNG

Die Zeckenkarte kann mehrmals verwendet werden. Reinigen Sie sie nach jedem Gebrauch gründlich mit heissem Wasser und Seife.

06 ENTSORGUNG UND NACHBESTELLUNG

Die Zeckenkarte kann über den Hausmüll entsorgt werden. Zeckenkarten können bei careware nachbestellt werden.



07 HERSTELLER, LIEFERANT UND SERVICEADRESSE

Hersteller

SafeCard ApS
Hem Odde
8660 Skanderborg
Dänemark

Lieferant und Serviceadresse

careware schweiz gmbh
Kernserstrasse 31
6060 Sarnen
Schweiz
Kundenservice: 00800 33 800 800
kundendienst@careware.ch
www.careware.ch